

Spezial Ölspray

Συντηρητικό σπρέι εργαλείων

✓ free from CFC's

- περιέχει άριστης ποιότητας λευκό λάδι για χρήση σε ιατρικά εργαλεία για
- την συντήρηση των εργαλείων πρίν την αποστείρωση σε κλίβανο ατμού
- ιδανική λίπανση για τα κινούμενα μέρη οργάνων



CE

Ιδιότητες προϊόντος

Το **SPEZIALÖLSPRAY** είναι ένα σπρέι με άριστης ποιότητας λευκό λάδι για την συντήρηση όλων των ιατρικών εργαλείων και των μεταλλικών αντικειμένων για λίπανση των αρθρώσεων τους. Σχηματίζει ένα προστατευτικό περίβλημα στις μεταλλικές επιφάνειες και προσφέρει ιδανική λίπανση στα κινούμενα μέρη οργάνων και προστασία από διάβρωση πρίν την αποστείρωση στον κλίβανο. Επίσης, είναι κατάλληλο για την συντήρηση βαλβίδων άκαμπτων ενδοσκοπίων, καθώς και για τους τροχούς σε φορεία μεταφοράς.

Πεδίο Εφαρμογής

Για τη διατήρηση:

- <ιατρικών εργαλείων (π.χ πρίν από την αποστείρωση με ατμό)
- <τουρμπίνες
- <χειρολαβές,
- <άκαμπτων ενδοσκοπίων χωρίς βαλβίδες

Το **Spezial Ölspray** εγγυάται την βέλτιστη λίπανση των κινούμενων μερών των εργαλείων και αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση.

Εφαρμογή

Εργαλεία:

Ψεκάστε τα εργαλεία με το **Spezial Ölspray** από απόσταση περίπου 25 εκατοστών. Εάν ενδείκνυται μετά μπορεί να γίνει η αποστείρωση.

Προσοχή: Μην εφαρμόζετε πολύ λάδι, ώστε να μην παρεμβαίνει με την αποστείρωση.

Για τουρμίνες, χειρολαβές ή περιστρεφόμενα υλικά:

Χρησιμοποιήστε το **Spezial Ölspray** δύο φορές την ημέρα ή ψεκάστε το μέσω των συσκευών για την εφαρμογή 1 δευτ. πρίν την αποστείρωση. Για να εφαρμόσετε το προϊόν κρατήστε το μπουκάλι κατακόρυφα. Ανακινήστε το πρίν από τη χρήση.

Σύνθεση

Paraffinum liquidum

Propellants: propane/butane (free from CFC's)

Μονάδα διανομής

Συσκευασία	Τεμάχια	PZN	Κωδικός
500 ml aerosol can	12		141.203.500

Ειδικές πληροφορίες

Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C. Μην ανοίγετε το δοχείο ακόμα και μετά από τη χρήση του. Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο.

Μην ψεκάζετε σε θερμές επιφάνειες. Μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Στις περιπτώσεις με επιφάνειες από latex, καλύτερα να χρησιμοποιούμε **Silikon Spray**.

Να μην χρησιμοποιείτε το **Spezial Ölspray** ως λιπαντικό για εύκαμπτα ενδοσκόπια.

Κατάσταση προϊόντος

Είναι σύμφωνα με το EU-guideline 93/42 EEC για ιατρικά προϊόντα.



Dr. Schumacher GmbH

www.schumacher-online.com