



0.320 kg



120 kg



30 kg/m<sup>3</sup>



**GR** - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις προσεκτικά!

### 1. Οδηγίες ασφαλείας

- ♥ Συμβουλευτείτε πάντοτε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για να ρυθμίσετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν και να μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε κατάλληλα .
- ♥ Να μην φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, να μην αφήνεται εκτεθειμένο στον ήλιο (Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αφήνεται στο εσωτερικό αυτοκινήτου, απευθείας εκτεθειμένο στο ηλιακό φως!).
- ♥ Πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, να αποφεύγονται τα ξηρά μέρη. Τα μαξιλάρια πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση ή σχίσιμο.
- ♥ Ελέγξτε το κάλυμμα μαξιλαριού για τυχόν διατρήσεις και διαρροές πριν από τη χρήση.
- ♥ Ελέγξτε τη σταθερότητα του μαξιλαριού και τη σωστή τοποθέτηση του.
- ♥ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ανώτερες των 38°C ή 100°F ή κατώτερες των 0°C ή 32°F).
- ♥ Δεν πρέπει να τροποποιείτε ούτε να επισκευάζετε αυτό το προϊόν.
- ♥ Σε περίπτωση μεγάλης περιόδου μη χρησιμοποίησης, η συσκευή σας από τον εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο.
- ♥ Να τηρείτε το όριο βάρους που αναφέρεται για κάθε προϊόν.
- ♥ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης: Δεν πρέπει να γονατίζετε ή στέκεστε όρθιος/α επάνω στο μαξιλάρι.
- ♥ Αν παρατηρήσετε ερυθρότητα στο δέρμα σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- ♥ Αυτό το ιατροφαρμακευτικό προϊόν έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της: διάρκεια και συχνότητα χρήσης.
- ♥ Σε περίπτωση δυσφορίας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

### 2. Ένδειξη

Το μαξιλάρι καθίσματος κρατά την πλάτη σας ευθεία ενώ κάθεστε άνετα. Η σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης του χρήστη και το άνοιγμα του μαξιλαριού μειώνουν τους καλοήθεις πόνους στην πλάτη.

### 3. Περιγραφή και χρήση του προϊόντος

Το μαξιλάρι αποτελείται από βάση αφρώδους πολυαιθέρα, καλυμμένη με βαμβακερό κάλυμμα που πλένεται.

### 4. Συντήρηση

#### Πλύσιμο των καλυμμάτων:

Αφαιρέστε το μαξιλάρι από το κάλυμμα. Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 30° C. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

#### Πλύσιμο μαξιλαριών

Αφαιρέστε το μαξιλάρι από το κάλυμμα του, περάστε ένα μαλακό, και υγρό πανί επάνω από το μαξιλάρι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σαπούνι ούτε να βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό. Μετά το πλύσιμο, σκουπίστε με ένα πανί και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό από τον οποίον αγοράσατε τη συσκευή.

### 5. Υλικά

Βαμβακερό κάλυμμα με φερμουάρ. Αφρός από πολυαιθέρα (PE).

### 6. Διαχείριση αποβλήτων

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

### 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν είναι βιοσυμβατό. Συμμορφώνεται με το εξής πρότυπο: CE