



GR EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ : ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
USER MANUAL : ANTI-DECUBITUS CUSHIONS

REF: 0810010, 0810011 0810012, 0810013
0810014, 0810015, 0810016, 0810017,
0810230, 0810231,0810232,0810233



CE

Προοριζόμενη Χρήση:

Τα Μαξιλάρια Κατακλίσεων με αεροκυψέλες ή/και Gel έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν και να καθυστερήσουν το σχηματισμό κατάκλισης. Προορίζονται και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους που διατηρούν αναπηρικό καροτσάκι και έχουν καθιστικό τρόπο ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήστες που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα και θέλουν να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά τους. Το Μαξιλάρι Κατακλίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη. Όταν τοποθετούμε το μαξιλάρι, είναι σημαντικό ο χρήστης να σηκώνεται ή να ανυψώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να περιοριστεί η παρατεταμένη συμπίεση της λεκάνης στην περιοχή των εξεχόντων οστών.

Χαρακτηριστικά:

- Μεταξένια αίσθηση και απαλότητα για μέγιστη προστασία των μαλακών ιστών
- Μοναδικός συνδυασμός αέρα και gel (για τις εκδόσεις που αφορά) όπου παρέχουν αποτελεσματική ανακούφιση και άνεση από την πίεση για τον χρήστη με κατάκλιση
- Αεροκυψέλες αέρα συνδεδεμένες μεταξύ τους βοηθάνε στην απαλλαγή της Υψηλής Πίεσης και το gel (για τις εκδόσεις που αφορά) στο εσωτερικό δεν αποδίδει μόνο καλύτερη άνεση αλλά βοηθά και στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Προστατευτική επίστρωση από PU για εύκολο καθάρισμα **(αφορά μόνο τους κωδικούς 0810010- 0810014)**
- Προστατευτική επίστρωση από PVC για εύκολο καθάρισμα **(αφορά μόνο τους κωδικούς 0810015-0810017 & 0810230-0810233)**
- Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά.
- Εύκολη προσαρμογή με ρύθμιση αέρα για μεγαλύτερη άνεση.**(μόνο για 0810010, 0810015,0810016,0810017,0810230, 0810231, 0810232, 0810233)**

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Ένα Μαξιλάρι Κατάκλισης
- Ένα Κάλυμμα
- Ένα Kit Επιδιόρθωσης **(μόνο για 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)**
- Ένα Χειροκίνητο Έμβολο Αέρα **(μόνο για 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)**

Οδηγίες ρύθμισης:

1. Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο κάθισμα.
2. Ρυθμίστε την/τις βαλβίδες και φουσκώστε το μαξιλάρι με την εύκαμπτη αντλία και τον εύκαμπτο σωλήνα και μετά κλείστε την/τις βαλβίδες.
3. Τα μαξιλάρια διπλών διαμερισμάτων (διπλής εισόδου αέρα) (εάν διατίθενται) μπορούν να ρυθμίζονται ανεξάρτητα ώστε να αυξάνεται η θέση και η ευστάθεια ή ο έλεγχος από πλευρά σε πλευρά ή μπροστά προς τα πίσω.
4. Τοποθετήστε τον ασθενή πάνω στο μαξιλάρι.
5. Συνιστούμε να προσαρμόσετε ξανά την πίεση του μαξιλαριού κάθε 10 ημέρες.

Οδηγίες καθαρισμού & πλύσιμάτος:

Μαξιλάρι

- Πλύνετε το μαξιλάρι με σαπούνι (αντισηπτικό σαπούνι).
- Σκουπίστε το μαξιλάρι με υγρό πανί: ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστή ατμού.

Κάλυμμα

- Πλύνετε σε 30 ° C .Μην χρησιμοποιείται σίδερο.
- Για λόγους υγιεινής, κάθε προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε έναν ασθενή μόνο.
- Σας συνιστούμε να αγοράσετε ένα δεύτερο προστατευτικό κάλυμμα που θα χρησιμοποιηθεί ενώ το πρώτο πλένεται για να αποφύγετε τη απευθείας επαφή του ασθενούς και της επιφάνειας του προϊόντος.

Επισκευή (μόνο για 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)

- Εάν το μαξιλάρι τυχαία τρυπηθεί, χρησιμοποιήστε το kit επισκευής που συνοδεύει το μαξιλάρι.
- Εφαρμόστε ελαφρά τον ελαστικό δεσμό.
- Τοποθετήστε το έμπλαστρο στη σωστή θέση.
- Πιέστε προς τα κάτω την επιδιόρθωση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
0810010	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL & ΑΕΡΑ COZY	GEL & ΑΕΡΑ	41x41x5cm	130 Kg
0810011	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH 3D I	GEL	42x40x2cm	130 Kg
0810012	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH 3D II	GEL	46x42x2cm	130 Kg
0810013	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH I	GEL	40x40x1,6cm	130 Kg
0810014	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH II	GEL	46x40x1,6cm	130 Kg
0810015	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ. ERGO LITE	ΑΕΡΑ	46x40x6 & 10cm	110 Kg
0810016	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ Comfy I	ΑΕΡΑ	40x40x8cm	130 Kg
0810017	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ Comfy II	ΑΕΡΑ	46x40x8cm	130 Kg
0810230	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 35x41x5cm	ΑΕΡΑ	35x41x5cm	130 Kg
0810231	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 41x41x5cm	ΑΕΡΑ	41x41x5cm	130 Kg
0810232	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 47x41x5cm	ΑΕΡΑ	47x41x5cm	130 Kg
0810233	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 47X47X5cm	ΑΕΡΑ	47X47X5cm	130 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ
0810010	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL & ΑΕΡΑ COZY	PU	1
0810011	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH 3D I	PU	ΧΩΡΙΣ
0810012	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH 3D II	PU	ΧΩΡΙΣ
0810013	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH I	PU	ΧΩΡΙΣ
0810014	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL-TECH II	PU	ΧΩΡΙΣ
0810015	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ. ERGO LITE	PVC	2
0810016	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ Comfy I	PVC	2
0810017	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ Comfy II	PVC	2
0810230	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 35x41x5cm	PVC	1
0810231	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 41x41x5cm	PVC	1
0810232	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 47x41x5cm	PVC	1
0810233	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛ. ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 47X47X5cm	PVC	1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΑΛΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
0810021	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 41X41X5 (SP 0810010 , 0810231)	0810010 & 0810231
0810022	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 3D 42X40X2 (SP 0810011)	0810011
0810023	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 3D 46X42X2 (SP 0810012)	0810012
0810024	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 40X40X1,6 (SP 0810013)	0810013
0810025	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 46X40X1,6 (SP 0810014)	0810014
0810026	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 46X40X6/10 (SP 0810015)	0810015
0810027	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 40X40X8 (SP 0810016)	0810016
0810028	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 46X40X8 (SP 0810017)	0810017
0810234	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 35x41x5cm (SP 0810230)	0810230
0810235	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 47x41x5cm (SP 0810232)	0810232
0810236	ΚΑΛΥΜΜΑ STRETCH 47x47x5cm (SP 0810233)	0810233

ΠΡΟΣΟΧΗ(!)

- Μην καπνίζετε & μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας κοντά στο Μαξιλάρι.
- Μην έχετε το Μαξιλάρι σε επαφή με άμεσες εστίες θερμότητας.
- Αν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το προϊόν, αδειάστε το από τον αέρα. **(μόνο για 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)**
- Καθαρίζετε το προϊόν με εβδομαδιαία συχνότητα.
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα
- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.
- Η χρήση της εν λόγω συσκευής απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAC A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAC A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη συσκευή και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.



Προστασία Του Περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Δήλωση Συμμόρφωσης:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

Εγγύηση:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ΔΥΟ (2) έτη* από τη ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης Δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

***έξι (6) μήνες το Χειροκίνητο έμβολο Αέρα (Τρόμπτα) και το Κάλυμμα**

Φόρμα Εγγύησης:

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς:S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Intended Use:

These Anti-Decubitus Cushions with Air-Cells or/and Gel inside, have been designed to reduce and delay the decubitus.

They can be used for disabled and elderly people who maintain a wheelchair and sedentary lifestyle for a long time.

It can also be used for users who do not have any symptoms and want to offer more comfort in their daily life.

The device can be used by the user themselves.

While sitting on the cushion, it is important that the user gets up or is lifted up as many times as possible to limit sustained compression of pelvis in the vicinity of protruding bones..

Features:

- Silky feel and softness for maximum soft tissue protection
- Unique combination of air and gel (for the relevant versions) provides effective relief and comfort from the pressure for the user with decubitus
- Interconnected air cells provide high pressure relief, while gel (for the relevant versions) not only offers better comfort but also helps maintain body temperature
- Ergonomic design
- PU protective coating for easy cleaning (**only for codes 0810010-0810014**)
- PVC protective coating for easy cleaning (**only for codes 0810015-0810017 & 0810230-0810233**)
- Lightweight and easy to Carry.
- Easy adjustment with air settings for greater comfort, (**only for 0810010, 0810015,0810016,0810017,0810230, 0810231, 0810232, 0810233**)

Box Components

- One Cushion
- One Cover
- One Repair Kit. (**only 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233**)
- One Manual Air Pump, (**only for 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233**)

Set-up Instructions:

1. Place the cushion on the seat.
2. Open the valves tap and inflate the cushion with the hand pump and hose connector and close the tap.
3. The dual compartments (If available) can be adjusted independently to increase positioning and stability or either side – to - side or front – to – back control (to adjust bucket on tilt angle).
4. Place the patient on the cushion.
5. We recommend that you re - adjust the cushion's pressure every 10 days.

Cleaning & Washing Instructions

Cushion

- Wash the cushion with antiseptic soap.
- Wipe the cushion using wet cloth: rinse in clear water then dry in the open air.
- Do not use detergents or other solvents.
- Do not use wash machine or tumble dry.
- Do not use heat or steam autoclave.

Cover

- Wash at 30 °C, not iron.
- For hygiene reasons, each cushion should be used on one patient only.
- We recommend that you purchase a second protective cover to be used while the first is being washed in order to avoid direct contact of the patient and the surface of the product.

Repair (only for 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233):

- If the cushion is accidentally pierced, use the repair kit supplied with the cushion.
- Apply the rubber bond sparingly.
- Stick the patch to the right position.
- Press down the repairing patch

Technical Specifications:

MBK CODE	DESCRIPTION	WITH	DIMENSION	MAX LOAD
0810010	Cushion COZY	AIR & GEL	41x41x5cm	130 Kg
0810011	Cushion GEL-TECH 3D I	GEL	42x40x2cm	130 Kg
0810012	Cushion GEL-TECH 3D II	GEL	46x42x2cm	130 Kg
0810013	Cushion GEL-TECH	GEL	40x40x1,6cm	130 Kg
0810014	Cushion GEL-TECH I	GEL	46x40x1,6cm	130 Kg
0810015	Cell Cushion PVC ERGO-LITE	AIR	46x40x6 & 10cm	110 Kg
0810016	Cell Cushion PVC Comfy II	AIR	40x40x8cm	130 Kg
0810017	Cell Cushion PVC Comfy I	AIR	46x40x8cm	130 Kg
0810230	AIR CELL CUSHION 35x41x5CM	AIR	35x41x5cm	130 Kg
0810231	AIR CELL CUSHION 41x41x5CM	AIR	41x41x5cm	130 Kg
0810232	AIR CELL CUSHION 47x41x5CM	AIR	47x41x5cm	130 Kg
0810233	AIR CELL CUSHION 47x47x5CM	AIR	47x47x5cm	130 Kg

MBK CODE	DESCRIPTION	COATING MATERIAL	VALVES
0810010	Cushion COZY	PU	1
0810011	Cushion GEL-TECH 3D I	PU	WITHOUT
0810012	Cushion GEL-TECH 3D II	PU	WITHOUT
0810013	Cushion GEL-TECH	PU	WITHOUT
0810014	Cushion GEL-TECH I	PU	WITHOUT
0810015	Cell Cushion PVC ERGO-LITE	PVC	2
0810016	Cell Cushion PVC Comfy II	PVC	2
0810017	Cell Cushion PVC Comfy I	PVC	2
0810230	AIR CELL CUSHION 35x41x5CM	PVC	1
0810231	AIR CELL CUSHION 41x41x5CM	PVC	1
0810232	AIR CELL CUSHION 47x41x5CM	PVC	1
0810233	AIR CELL CUSHION 47x47x5CM	PVC	1

CODE FOR THE SPARE PART	DESCRIPTION	SUITABLE:
0810021	COVER 41X41X5 (SP 0810010, 0810231)	0810010 & 0810231
0810022	COVER 3D 42X40X2 (SP 0810011)	0810011
0810023	COVER 3D 46X42X2 (SP 0810012)	0810012
0810024	COVER 40X40X1,6 (SP 0810013)	0810013
0810025	COVER 46X40X1,6 (SP 0810014)	0810014
0810026	COVER 46X40X6/10 (SP 0810015)	0810015
0810027	COVER 40X40X8 (SP 0810016)	0810016
0810028	COVER 46X40X8 (SP 0810017)	0810017
0810234	COVER 35x41x5cm (SP 0810230)	0810230
0810235	COVER 47x41x5cm (SP 0810232)	0810232
0810236	COVER 47x47x5cm (SP 0810233)	0810233

CAUTION(!)

- Do not smoke & do not use any flame near the cushion
- Do not expose the cushion to direct heat.
- Do not use sharp objects near the cuff.
- If you need to store the cushion deflated first. **(only for 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)**
- Clean the product in weekly frequency.
- Protect the parts from scratches, cuts and punctures.
- In case of damage or malfunction, please contact your authorized and trained dealer.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product or use other than that mentioned in this manual.
- MOBIAK S.A reserves the right to make changes on the device and the information contained in this document without previous notice.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



If your product needs replacement, or no longer serves you, consider the environment.

- 1) Do not dispose of your product along with the municipal waste (this is also the importance of the shown recycling symbol).
- 2) Contact your municipal authority to indicate the point of disposal of your product for recycling
- 3) You have to dispose of your useless product in the right place.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

Declaration of Conformity:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

WARRANTY:

The product has a warranty of good operation for TWO (2)* years from purchase date.

The warranty covers factory defects & does NOT cover defects resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product instructions for use.

It also does NOT cover worn parts and whatever it is going to be damaged during use or over time.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where provided), & transport companies are also not covered by the warranty.

*** six (6) months for the Manual Air Pump and Cover**

Warranty Claim Form

Buyers Data

Name:

Date of purchase:S/N.....

LOT:.....Phone:

Resellers Data

Name :

.....

Address:.....

Phone:

Reseller Stamp



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE
CE Mark



Κατασκευαστής
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής
Production Date

REF

Κωδικός Προϊόντος
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης
Read the instruction for use

SN

Σειριακός Αριθμός
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το
κουτί είναι κατεστραμμένο
Do not use if Package is Damage

LOT

Αριθμός Παρτίδας
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά
Right Way Up

UDI

Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από
ηλιοφάνεια
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό
Keep Dry



Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή
Handle With Care



Εύθραστο
Fragile



Χρήση Μόνο για
Εσωτερικό Χώρο In Door
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών
Εξαρτημάτων
Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive