



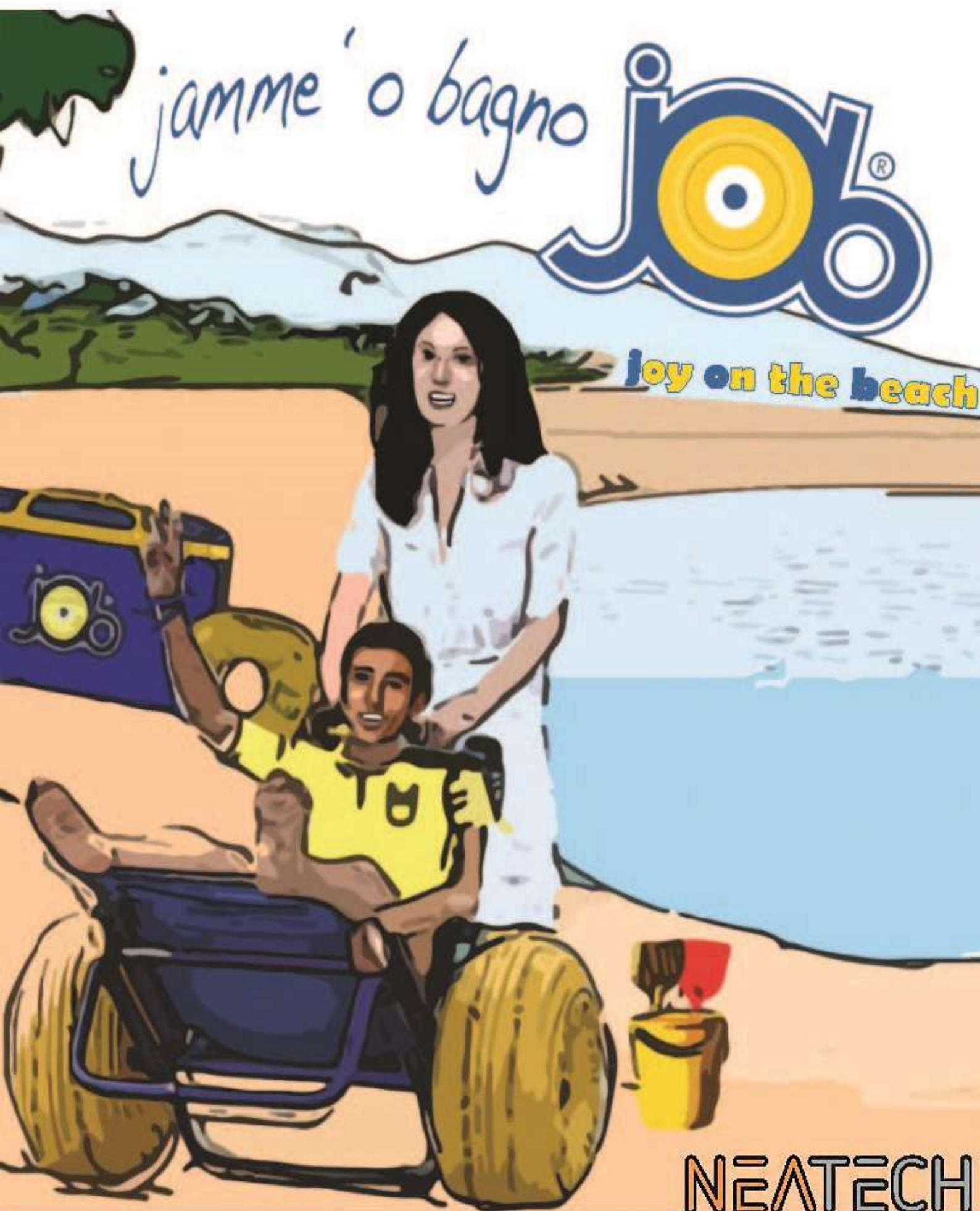

NEATECH

ΠΡΟΪΟΝ	JOB
ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ	S105
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ CE	 Κανονισμός ΕΕ 2017/745 - Ιατρική συσκευή κλάσης I - Κανόνας I Παράρτημα VIII
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	ISO 14971: 2012 UNI EN 12182: 2012
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Neatech.it SRL μέσω A. de Curtis 4/A, 80040, Cercola (NA), Italia Τηλ. +39 081 555 1946 www.neatech.it - info@neatech.it
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	Το προϊόν προορίζεται για χρήση για ανακούφιση ή βοηθητική προς έναν τραυματισμό ή αναπηρία. Ιδιαίτερα το αναπηρικό αμαξίδιο προορίζεται για χρήση από ομάδες με προσωρινές ή μόνιμες κινητικές δυσκολίες που περιορίζονται σε καθιστή θέση και πρέπει να κινούνται στην παραλία και σε άλλους τύπους αδιαπέραστων επιφανειών.

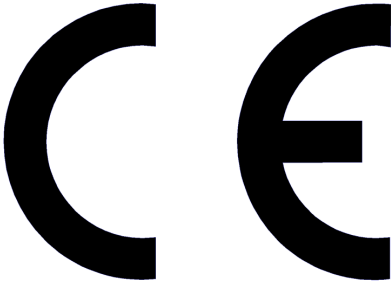

Νοιαζόμαστε πολύ για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη χρηστικότητα των προϊόντων μας.

Εργαζόμαστε πάντα για τη βελτίωσή τους. Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης αυτού του εγχειριδίου σε αυτόν τον σύνδεσμο.

<https://www.neatech-download.it/s080-manual/>

Περιεχόμενα

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	2
2.1 Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν κατά την παράδοση	2
2.2 Αποσυσκευασία	2
2.3 Συναρμολόγηση αναπηρικού αμαξιδίου	3
3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	7
3.1 Ρύθμιση στηρίγματος κάτω άκρων.....	7
4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	8
4.1 Στηρίγματα βραχίονα	10
4.2 Σετ τρίτου τροχού	10
4.3 Τέντα ηλίου	12
4.4 Μεταφορά και αποθήκευση	15
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	16
5.1 Συντήρηση και καθαρισμός	16
5.2 Έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται στο προϊόν	17
5.3 Τρύπημα ελαστικών	18
5.4 Επαναχρησιμοποίηση	18
6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	19
6.1 Διαστάσεις	19
7 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	20
7.1 Σειριακός αριθμός	21

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει παρουσία κινδύνου για τον χρήστη ή ζημιά για το προϊόν. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες όταν υπάρχει αυτό το σύμβολο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει την ύπαρξη κινδύνου σωματικής βλάβης

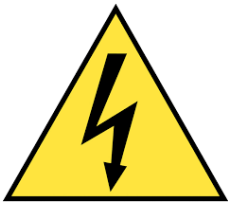

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει την παρουσία κινδύνου που σχετίζεται με την παρουσία ηλεκτρικής ενέργειας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει αυτό το σύμβολο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει γενικές πληροφορίες που αποσκοπούν στην απλοποίηση ή την καλύτερη εξήγηση της χρήσης του προϊόντος.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει την ανάγκη επικοινωνίας με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή τον κατασκευαστή.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία ορισμένων επιφανειών μπορεί να αυξηθεί όταν το προϊόν εκτίθεται σε εξωτερικές πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ο κίνδυνος ανατροπής μειώνεται σημαντικά λόγω του σχεδιασμού του προϊόντος σύμφωνα με το EN 12182.

Σε κάθε περίπτωση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις προσαρμογές και τη χρήση του προϊόντος για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον χρήστη ή στο ίδιο το προϊόν.

Οποιαδήποτε μεταφορά σε κλίση μεγαλύτερη από τη μέγιστη κλίση ασφαλείας μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Παρακαλούμε μην καθίσετε στα μπράτσα.



Το κέντρο ισορροπίας της αναπηρικής πολυθρόνας και έτσι η σταθερότητά της επηρεάζεται από:

- Θέση χρήστη
- Χρήση σακιδίου
- κλίση του καθίσματος



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας δεν κρέμονται ή δεν βρήσκονται στο διάστημα μεταξύ των υποπόδων. Γενικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κατάλληλο χώρο στις περιοχές που θα ταξιδέψετε για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα σωματικής βλάβης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης πληροφοριών και οδηγιών σε κατάλληλη μορφή για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος ή των μερών του για οποιονδήποτε άλλο

σκοπό από αυτόν που υποδεικνύεται. Για σωστή χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται σε

αυτό το εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που προκαλούνται από

ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ακατάλληλη επιλογή μοντέλου προϊόντος και διαμόρφωσης.

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές βασίζονται στις λεπτομέρειες του προϊόντος που ήταν διαθέσιμες κατά την προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και δεν προορίζονται να είναι ακριβώς το πραγματικό προϊόν.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς στο ίδιο το προϊόν. Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μη χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με άλλες ιατρικές συσκευές χωρίς πρώτα να έχετε λάβει υπόψη σας οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω συνδυασμού περισσότερων προϊόντων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Για οποιαδήποτε ανάγκη που δεν περιγράφεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Neatech.it SRL

μέσω A. de Curtis 4/A, 80040, Cercola (NA), Ιταλία

www.neatech.it - info@neatech.it - +39 081 555 1946

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εάν συμβεί κάποιο περιστατικό, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Για λίστα με εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



ΔΙΑΘΕΣΗ

Αυτό το προϊόν και όλα τα μέρη του δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης και απόρριψης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων.

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αγαπητέ φίλε,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Το JOB είναι ένα αμαξίδιο για τη μεταφορά ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες προσαρμοσμένη στη θάλασσα, το χιόνι ή τις εκδρομές εκτός δρόμου. Παρέχεται με ένα ζευγάρι ρόδες σχεδιασμένες για εύκολη μεταφορά σε κάθε είδους επιφάνεια (άμμος, βότσαλα, χιόνι).

Λόγω της κατασκευής με υλικά από κράμα αλουμινίου που δεν χαλάνε από το αλάτι, με το Job μπορείτε να μπείτε στο νερό μένοντας καθήμενοι μέσα άνετα.

Είναι απολύτως αποσυναρμολογούμενη για να διευκολύνεται η μεταφορά και σε μικρά οχήματα.

2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

2.1 Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν κατά την παράδοση

- Ελέγξτε για την ακεραιότητα της αρχικής συσκευασίας.
- Ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες στα έγγραφα αποστολής.
- Ελέγξτε για τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα της συσκευής σε όλα τα μέρη της, κατά την παράδοση ή αμέσως μετά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά από απρόσεκτη μεταφορά.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της συσκευής δεν είναι κατεστραμμένη, γρατζουνισμένη, λυγισμένη κ.λπ.
- Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά διαπιστωθεί πρέπει να αναφέρεται αμέσως στα έγγραφα αποστολής και να κοινοποιείται αμέσως στον αποστολέα.


2.2 Αποσυσκευασία

Μέσα στο κουτί υπάρχουν:

- Πλάτη με επένδυση
- Υποπόδιο με επένδυση
 - Μπροστινή υποστήριξη
 - Μπάρα αντιστήριξης
- Κύριο πλαίσιο με επένδυση και συνδέσμους σωλήνων
-
- Ν. 2 τροχοί
 - Ν. 10 συνδέσμους τροχών
- Έγγραφα και εγχειρίδιο
- Αγορασμένα αξεσουάρ

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου, ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα περιγραφόμενα εξαρτήματα. **Αν όχι, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατό.**

2.3 Συναρμολόγηση του αναπηρικού αμαξιδίου

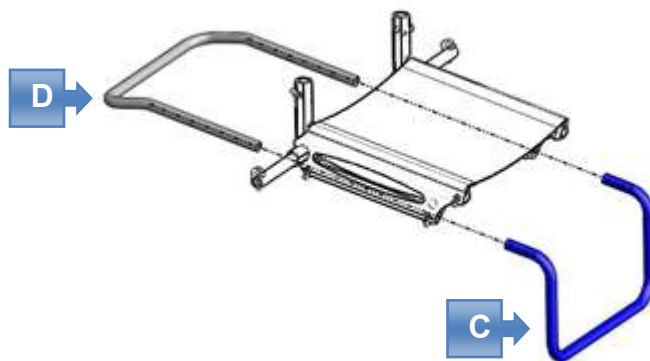

Φιγούρα 1


- Τοποθετήστε τη μπάρα αντι στήριξης (D) και τη μπροστινή μπάρα στήριξης (C) στο κύριο πλαίσιο (E), όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Ασφαλίστε τις δύο ράβδους με συνδέσμους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν ασφαλίσει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν ασφαλίσει σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Οι σωλήνες (D) και (C) έχουν το ίδιο πλάτος αλλά ο (D) είναι μακρύτερος.

Εάν οι σωλήνες (D) και (C) είναι ανεστραμμένοι, το αναπηρικό αμαξίδιο δεν θα έχει καλή ισορροπία με πιθανό κίνδυνο για τον χρήστη.

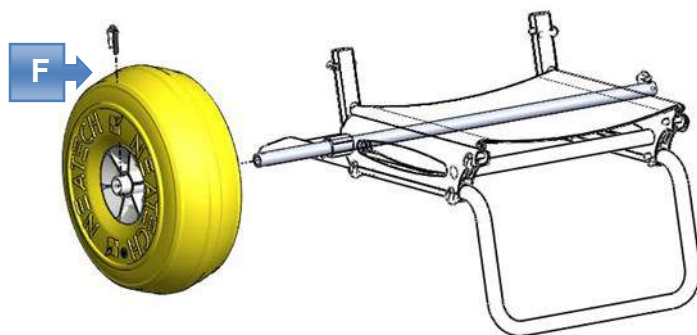


Σχήμα 2

- Τοποθετήστε τον τροχό (lh και rh) στον άξονα του πλαισίου όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Χρησιμοποιήστε την ειδική οπή που υπάρχει στη ρόδα, ευθυγραμμισμένη προηγουμένως με την οπή που υπάρχει στον άξονα του πλαισίου και τοποθετήστε τον σύνδεσμο (F).
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε σύνδεσμος τροχού είναι σωστά κλειδωμένος.

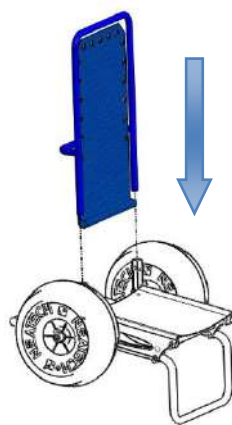

Εικόνα 3

- Τοποθετήστε το στήριγμα πλάτης στους δακτυλίους στο κύριο πλαίσιο όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Τοποθετήστε τους 2 συνδέσμους βαθιά μέσα στις κατάλληλες οπές για να ασφαλίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι σωστά κλειδωμένοι στο κύριο πλαίσιο.

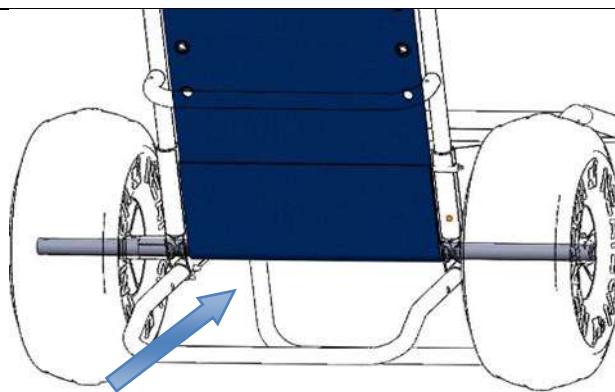


Εικόνα 4

- Τοποθετήστε τη λωρίδα που βρίσκεται στο κάτω άκρο της πλάτης, περνώντας την γύρω από τον άξονα των τροχών, όπως φαίνεται στο σχήμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό να στερεώσετε προσεκτικά την πλάτη με τα κλιπ στερέωσης και τη λωρίδα για την αποφυγή πιθανής αποσυναρμολόγησης

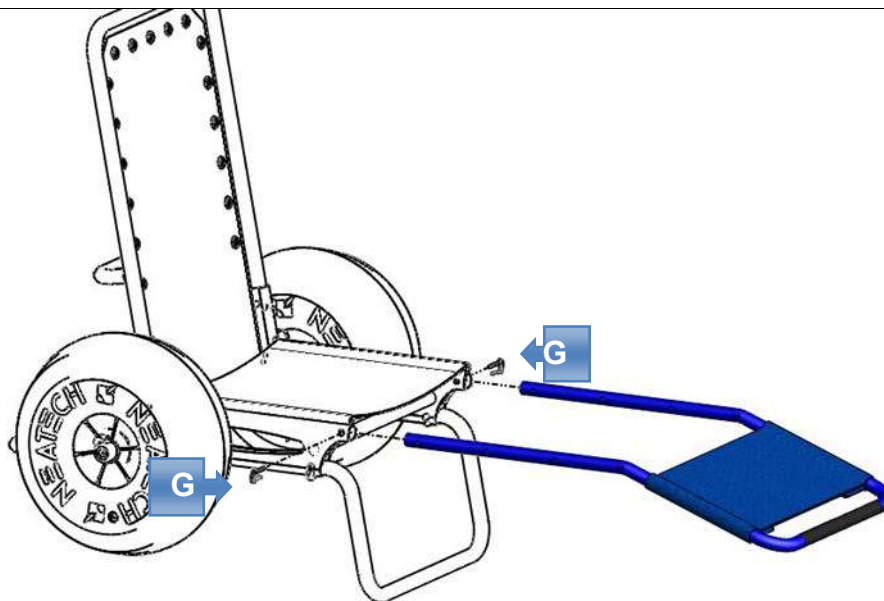

Εικόνα 5

- Τοποθετήστε το στήριγμα ποδιών στους σωλήνες του πλαισίου όπως φαίνεται στο σχήμα και ασφαλίστε το με τους 2 συνδέσμους (G).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σφίξτε σωστά τους δύο σωλήνες.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Για την σωστή ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων.



Αποσυναρμολόγηση του αναπηρικού αμαξιδίου

Για να το αποσυναρμολογήσετε εκτελέστε τα παραπάνω με αντίστροφη σειρά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί και οι σωλήνες έχουν ασφαλιστεί στο αντίστοιχο περίβλημα του πλαισίου για να αποφύγετε την απώλεια τους.

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1 Ρύθμιση στηρίγματος κάτω άκρων




Μέσος όρος χρόνου που απαιτείται

<5 λεπτά



Επίπεδο δυσκολίας:

Εύκολο

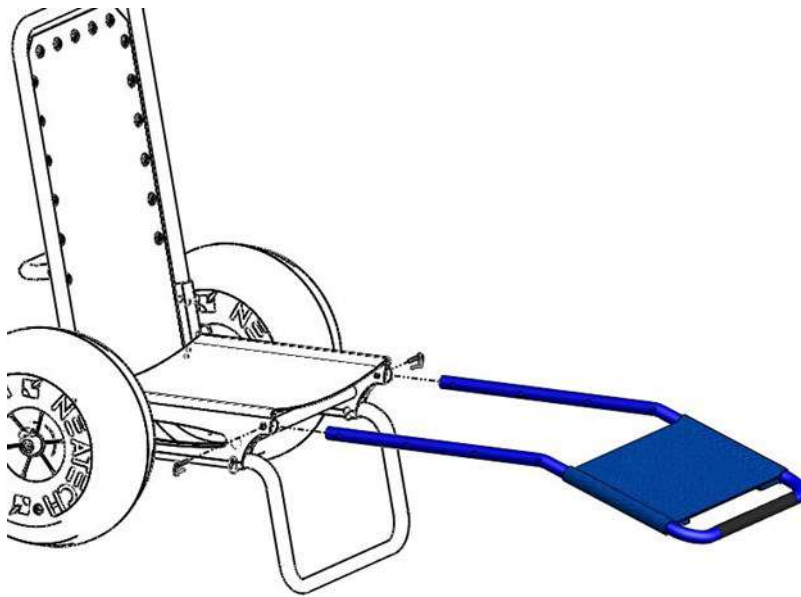

Εικόνα 6

- Αφαιρέστε τους συνδέσμους όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Τοποθετήστε το στηρίγμα σε μία από τις τρεις διαθέσιμες θέσεις.
- Τοποθετήστε ξανά τους συνδέσμους.



Η λειτουργία αυτή προορίζεται να εκτελεστεί από έναν βοηθό.

4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην στέκεστε πάνω στο προϊόν. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μεταφορά προς ή από το κάθισμα. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση της απόστασης μεταφοράς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν ασφαλίσει για να αποφευχθεί η κίνηση. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μην εγκαθιστάτε, συντηρείτε ή χειρίζεστε το προϊόν χωρίς να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και ολόκληρο το εγχειρίδιο.

Διατηρείτε πάντα αυτό το εγχειρίδιο κοντά στο προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην μεταφέρετε επιβάτες στο αναπηρικό αμαξίδιο ανεξάρτητα από την ηλικία του επιβάτη. Το αναπηρικό αμαξίδιο δεν έχει σχεδιαστεί για προπόνηση με βάρη και δεν είναι ασφαλές για χρήση ως κάθισμα κατά την προπόνηση με βάρη. Μην γέρνετε πάνω από την επένδυση της πλάτης για να φτάσετε αντικείμενα από πίσω, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του αμαξιδίου. Μην μετατοπίζετε το βάρος ή τη θέση καθίσματος προς την κατεύθυνση που προσπαθείτε να φτάσετε καθώς το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί. Μην στέκεστε στο πλαίσιο του αναπηρικού αμαξιδίου.

Ορισμένες παθολογίες μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το αμαξίδιο σας

Φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό σχετικά με τους φυσικούς σας περιορισμούς.

Εξασκήστε την ικανότητα οδήγησης υπό την επίβλεψη βοηθού.

Ζώνη λεκάνης

Το αναπηρικό αμαξίδιο διαθέτει υποδοχή για ζώνη λεκάνης. **Η ζώνη έχει σχεδιαστεί μόνο για να τοποθετεί τον χρήστη καλύτερα και όχι για οποιαδήποτε προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.**

Μεταφορά από και προς το αναπηρικό αμαξίδιο

Η μεταφορά χρηστών συνιστάται να πραγματοποιείται με την παρουσία βοηθού. Μην χρησιμοποιείτε τα υποπόδια ή τα μπράτσα ως στήριγμα.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ασφαλή χρήση και για αποφυγή καταστάσεων κινδύνου για τον χρήστη, επαληθεύστε αυτό η περιφέρεια των τροχών είναι μεταξύ 1380 και 1400 mm

Αν όχι, φουσκώστε ή ξεφουσκώστε τον τροχό εντός του συνιστώμενου εύρους.



Εικόνα 7



ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μη χρησιμοποιείτε αναπηρικό αμαξίδιο σε βαθιά ή με κύμα νερά.

Η παρουσία βοηθού είναι υποχρεωτική όταν το αναπηρικό αμαξίδιο είναι στο νερό.

Σήκωμα του αναπηρικού αμαξιδίου

Μην σηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο όταν χρησιμοποιείται. Μην σηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο πιάνοντας τα στηρίγματα κάτω άκρων. Εάν χρειάζεται πραγματικά να το σηκώσετε, προτείνεται να το πιάσετε με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός βοηθού.

4.1 Στήριγμα Βραχίονα

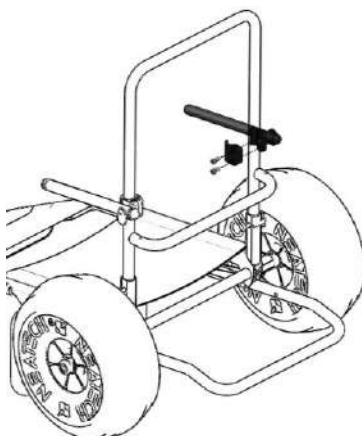

Εικόνα 8


- Τοποθετήστε το στήριγμα (rh και lh) στην πλάτη, όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση, σφίξτε τις δύο βίδες που φαίνονται στο σχήμα.

ΑΛΛΕΝ




6 mm

4.2 Σετ τρίτου τροχού

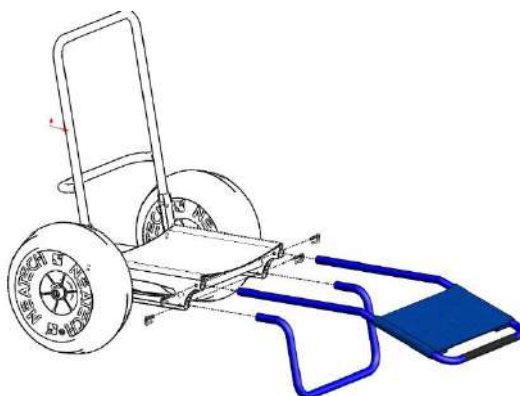

Εικόνα 9

- Αφαιρέστε το στήριγμα κάτω άκρων και την μπροστινή ράβδο στήριξης αφαιρώντας τους συνδέσμους όπως φαίνεται στο σχήμα.

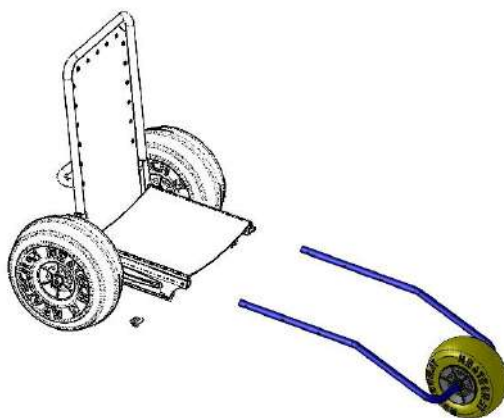

Εικόνα 10

- Συνδέστε το κιτ τρίτου τροχού εισάγοντας τους σωλήνες στις οπές μπροστά από το σκελετό, όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Εφαρμόστε τους συνδέσμους στις κατάλληλες οπές για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές οπές ανάλογα με το επιθυμητό βάθος.

Η ρύθμιση βάθους είναι η ίδια ρύθμιση με της μπάρας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για ασφαλή χρήση και για αποφυγή καταστάσεων κινδύνου για τον χρήστη, επαληθεύστε αυτό **η περιφέρεια του τροχού είναι μεταξύ 810 και 840 mm**

Αν όχι, φουσκώστε ή ξεφουσκώστε τον τροχό εντός του συνιστώμενου εύρους.

4.3 Τέντα ηλίου

Μέσα στο κουτί υπάρχουν:

- Τσάντα με τέντα και τα λουριά για το δέσιμο (1)
- Στηρίγματα (2)
-
- Μπάρες στήριξης τέντας (3)
-



Εικόνα 11



Εικόνα 12

- Από τις ράβδους στήριξης των τεντών αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα του σωλήνα βρίσκοντας την τρύπα της εικόνας.



Εικόνα 13

- Τοποθετήστε τα κίτρινα επίπεδα στηρίγματα στην τρύπα που μόλις εντοπίσατε και στη συνέχεια τοποθετήστε το στήριγμα για την τέντα σέρνοντάς το στην πλάτη. Κρατήστε τα επίπεδα, όρθια και στραμμένα προς τα πάνω.



Εικόνα 14

- Συνδέστε τον ιμάντα στο σωλήνα στο πίσω μέρος της πλάτης, έτσι ώστε το άγκιστρο να βλέπει προς τα έξω.



Εικόνα 15

- Συνδέστε τον ιμάντα στο πίσω μέρος της τέντας και στο άγκιστρο της ζώνης που είχε προηγουμένως στερεωθεί στον σωλήνα και τραβήξτε τους ιμάντες μέχρι να τεντωθούν πολύ.

Συνδέστε τα σχοινιά της τέντας στον σωλήνα του στηρίγματος κάτω άκρων.




Εικόνα 16

- Ρυθμίστε την τάση των σχοινιών από τα κλειδώματα μέχρι η τέντα να είναι σταθερή.

4.4 Μεταφορά και αποθήκευση

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε το ασφαλές σε καθαρό χώρο και μακριά από ζέστη.

Εάν είναι απαραίτητο να το μεταφέρετε για να διευκολύνετε τη λειτουργία του, αποσυναρμολογήστε το και χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη τσάντα ως αξεσουάρ.

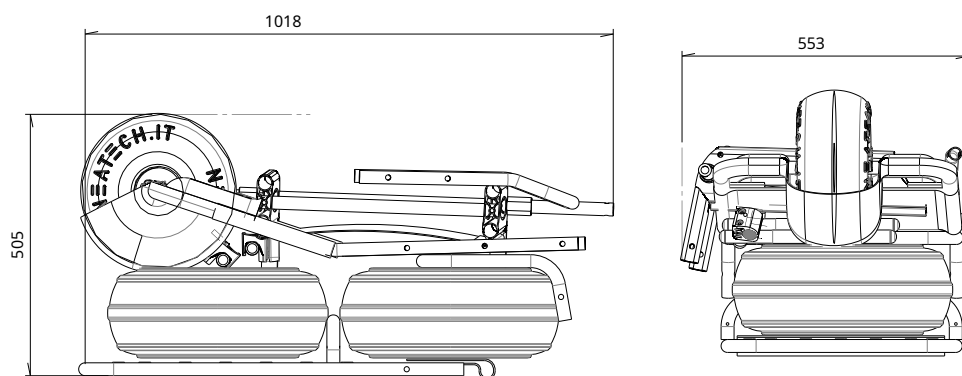

Εικόνα 17

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι το αναπηρικό αμαξίδιο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορά σε καθιστή θέση. Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες προφυλάξεις για τη χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου, τις οποίες συνιστάται να τηρείτε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και η μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Η τακτική συντήρηση βοηθά στη διατήρηση της ανέπαφης λειτουργικότητας και ασφάλειας του αναπηρικού αμαξιδίου. Η ανεπαρκής ή η έλλειψη φροντίδας και συντήρησης μπορεί να προκαλέσει περιορισμό της εγγύησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε εργασία στο αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης στις μπαταρίες. Είναι δυνατή μόνο η αντικατάστασή τους.

5.1 Συντήρηση και καθαρισμός

Για πλαστικά και μεταλλικά μέρη χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό. Για τις επενδύσεις και τα καλύμματα των καθισμάτων και της πλάτης χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά λεκέδων, διαλύτες, οξέα κλπ.

5.2 Έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται στο προϊόν

Τύπος διαδικασίας	
A	Που προορίζεται να εκτελεστεί από τον χρήστη.
B	Που προορίζεται να εκτελεστεί από έναν βοηθό.
C	Που προορίζεται να εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Διαδικασία	Συχνότητα	Τύπος διαδικασίας
Καθαρίστε το αναπτηρικό αμαξίδιο	Εβδομαδιαία	B - Βοηθός
Ελέγξτε αν η πίεση είναι αυτή που υποδεικνύεται στα ελαστικά και στο τμήμα 4 - 4.2.	Εβδομαδιαία	B - Βοηθός
Ελέγξτε την παρουσία όλων των συνδέσμων	Μηνιαία	B - Βοηθός

5.3 Τρύπημα ελαστικών

- Καθαρίστε την κατεστραμμένη επιφάνεια με αιθυλική αλκοόλη.
- Όταν η επιφάνεια είναι στεγνή, εφαρμόστε μερικές σταγόνες κόλλας για άκαμπτο PVC.
-
- Περιμένετε λίγα λεπτά για να στεγνώσει η κόλλα και, στη συνέχεια, φουσκώστε τους τροχούς όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν τελειώσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα.

5.4 Επαναχρησιμοποίηση

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. Πριν το διανείμετε, πρέπει να καθαριστεί και να υποβληθεί σε συντήρηση. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και πρέπει επίσης να παρέχονται κατά την πώληση.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικό βάρος (min-max) [kg]	~13.0 κιλά
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 κιλά
Το αναπηρικό αμαξίδιο πληροί τις απαιτήσεις για αντοχή στην ανάφλεξη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7176-16 [ναι-όχι]	Ναί
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής του υποστηρικτικού προϊόντος [χρόνια]	5
Θερμοκρασία λειτουργίας	ΑΠΟ -10 ° C -ΕΩΣ+40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	ΑΠΟ -20 ° C -ΕΩΣ +45 ° C

6.1 Διαστάσεις

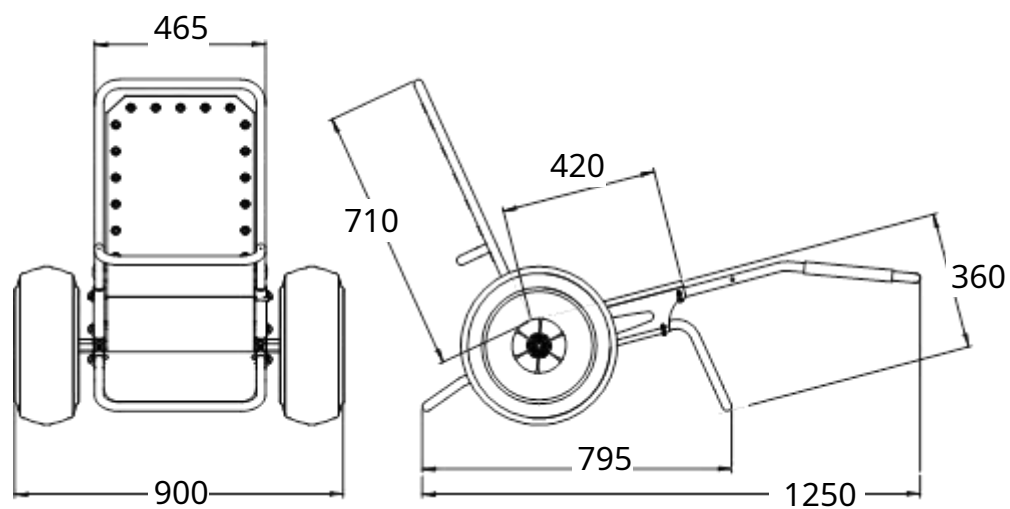

Εικόνα 18

7 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ορισμοί

- **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** Κατασκευαστής σημαίνει το νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν. Για το πεδίο εφαρμογής του παρακάτω εγγράφου, ο κατασκευαστής είναι:

Neatech.it srl

μέσω Antonio de Curtis 4/A - 80040 - Cercola (NA) Τηλ. +39 081 555 1946 -

info@neatech.it - neatech@pec.it - www.neatech.it

P.IVA IT04812481218 - REA NA715393

- **ΠΕΛΑΤΗΣ:** Πελάτης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν από τον κατασκευαστή. Για το πεδίο εφαρμογής του παρακάτω εγγράφου, ο Πελάτης είναι ο κάτοχος του οικονομικού εγγράφου που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή μετά την παράδοση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΪΟΝ:** Το προϊόν είναι το αγαθό που παρέχεται από τον κατασκευαστή στον πελάτη κατά την εκτέλεση μιας αγοράς

Πεδίο εφαρμογής της εγγύησης

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να διορθώσει οποιοδήποτε ελάττωμα, έλλειψη ποιότητας ή έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων που σχετίζονται με αυτόν ως αποτέλεσμα σχεδιασμού, κατασκευαστικών λαθών ή ελαττωμάτων στο υλικό που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Περίοδος εφαρμογής της εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία χρέωσης του πελάτη. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.

Τύπος προϊόντος	Περίοδος εγγύησης [μήνες]
Αναπηρικά αμαξίδια	24
Μέρη και αξεσουάρ αναπηρικών αμαξιδίων (εξαιρούνται οι μπαταρίες)	24

Πίνακας 1

Οποιοσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις υπό εγγύηση δεν μεταβάλλουν την αρχική περίοδο εφαρμογής της εγγύησης.

Εξαιρέσεις

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα


- Τροχοί
 - Επενδυμένα μέρη (αφροί πολυουρεθάνης, βισκοελαστικό)
 - Επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένου καμβά)
- Λαβές και πόμολα
 - Ασφάλειες και λυχνίες
 - Βούρτσες με ηλεκτρικό μοτέρ
- Φίλτρα

Η εγγύηση περιορίζεται σε ζημιές που σχετίζονται με το προϊόν και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει βλάβη που προκλήθηκε σε τρίτους ως αποτέλεσμα βλάβης του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά από υπερφόρτωση, ακατάλληλη χρήση, αλλαγές και επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση παραποίησης, εσφαλμένης αποθήκευσης, εσφαλμένης ή μη εξουσιοδοτημένης συντήρησης.

7.1 Σειριακός αριθμός

Για οποιαδήποτε αναφορά ή αίτημα βοήθειας, επικοινωνήστε τον σειριακό αριθμό που αναφέρεται στην ετικέτα στη θέση που φαίνεται στο σχήμα.

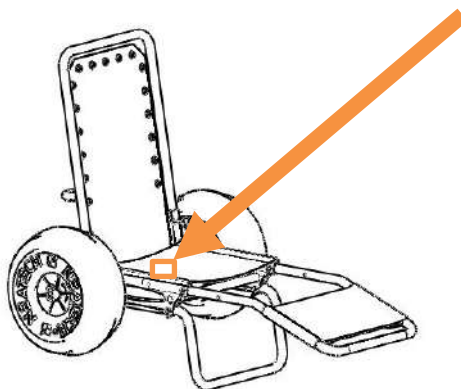

Εικόνα 19

Σημείωση


[illegible]

Neatech.it s.r.l.

via A. De Curtis, 4/A - 80040 Cercola (NA) Italy

tel. +39 0815551946 - fax +39 0815552507

www.neatech.it - info@neatech.it

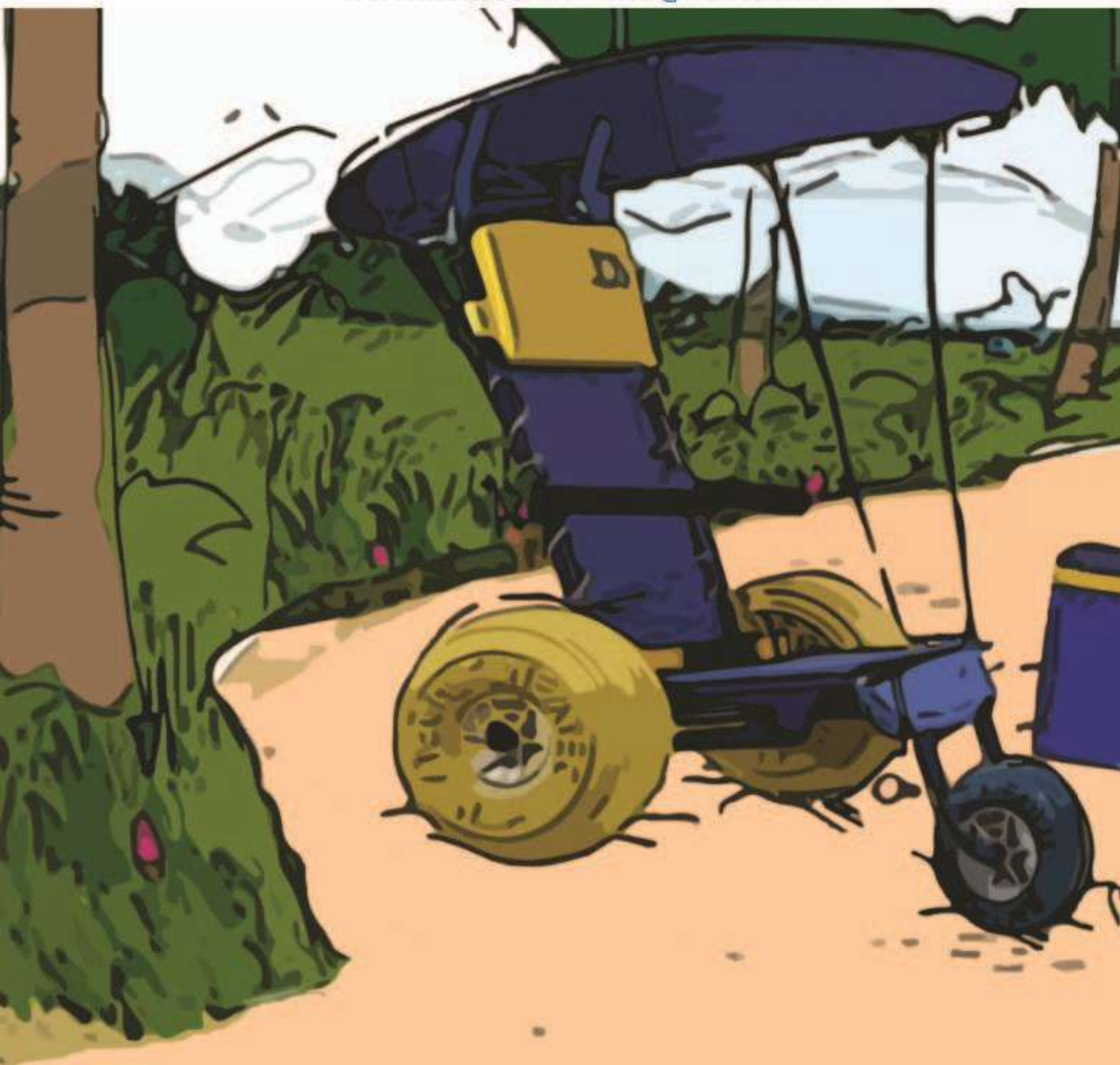

NEATECH™