


beurer

HK 123 XXL Cosy Grey
HK 123 XXL Nordic

Nordic

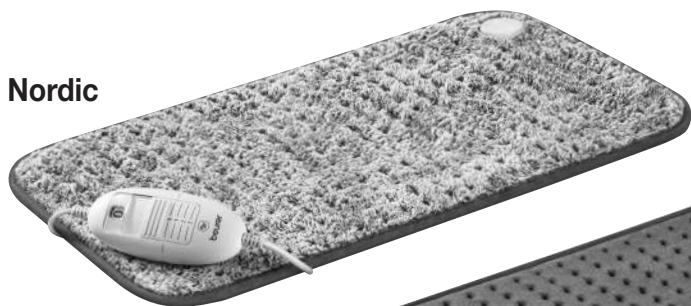

Cosy Grey

EL Ηλεκτρική θερμοφόρα
Οδηγίες χρήσεως



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Διαθέστε τις οδηγίες χρήσης και σε άλλους χρήστες. Μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής.

Πίνακας περιεχομένων

1. Παραδοτέα	3	4.5 Μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης	7
1.1 Περιγραφή της συσκευής	3	4.6 Απενεργοποίηση	7
2. Σημαντικές οδηγίες		5. Καθαρισμός και περιποίηση	7
Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση	4	6. Αποθήκευση	8
3. Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές	6	7. Απόρριψη	8
4. Χειρισμός	6	8. Τι κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;	9
4.1 Ασφάλεια	6	9. Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2 Θέση σε λειτουργία	6	10. Εγγυηση / σερβίς	9
4.3 Ενεργοποίηση	6		
4.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας	6		

Εξήγηση συμβόλων

Στη συσκευή, στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπόδειξη προειδοποίησης για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας.		
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα πρόσθετα εξαρτήματα.		
	ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες.		
	Διαβάστε τις οδηγίες!		Μην καρφώνετε βελόνες!
	Δεν το χρησιμοποιείτε διπλωμένο ή σουφρωμένο!		Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
	Κατασκευαστής		
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας 2		
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		
	Διαχωρίστε τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.		

	Σήμανση για την αναγνώριση του υλικού συσκευασίας. A = Σύντμηση υλικού, B = Αριθμός υλικού: 1-6 = Πλαστικά, 20-22 = Χαρτί και χαρτόνι		
	Διαχωρίστε το προϊόν και τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.		
	Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.		
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου		
	Το σήμα KEMA-KEUR τεκμηριώνει την ασφάλεια και την συμβατότητα με τα πρότυπα ενός ηλεκτροτεχνικού προϊόντος.		
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.		
	Κωδικός κατασκευαστή για δεδομένα παραγωγής		
	Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα στη συσκευή αυτή πληρούν τις υψηλές οικολογικές απαιτήσεις του Oeko-Tex Standard 100, όπως αποδεικνύεται από το ερευνητικό ινστιτούτο Hohenstein.		
	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C για πολύ ευαίσθητα		Μην σιδερώνετε
			Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά		Δεν πρέπει να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο (τυμπάνου)


1. Παραδοτέα

Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

- 1 Ηλεκτρική θερμοφόρα
- 1 Διακόπτης
- 1 Οδηγίες χρήσης

1.1 Περιγραφή της συσκευής

- 1. Βύσμα
- 2. Καλώδιο τροφοδοσίας
- 3. Διακόπτης
- 4. Φωτιζόμενες βαθμίδες θερμοκρασίας
- 5. Συρόμενος διακόπτης ON/OFF και βαθμίδων θερμοκρασίας
- 6. Κουμπωτός σύνδεσμος

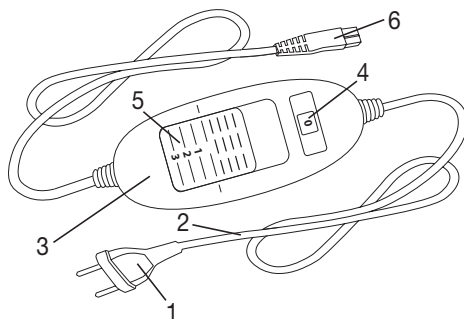

2. Σημαντικές οδηγίες Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μη τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή υλικές ζημιές (ηλεκτροπληξία, εγκαύματα στο δέρμα, πυρκαγιά). Οι ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνου δεν χρησιμεύουν μόνο για την προστασία της υγείας σας ή της υγείας τρίτων, αλλά και για την προστασία του προϊόντος. Γι' αυτό τηρείτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και μεταβιβάστε αυτές τις οδηγίες σε περίπτωση παράδοσης του εμπορεύματος σε τρίτους.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν αισθάνονται τη θερμότητα ή άλλα άτομα που χρειάζονται προστασία, διότι αυτά δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. διαβητικοί, άτομα με αλλοιώσεις του δέρματος λόγω ασθένειας ή περιοχές δέρματος με ουλές στην περιοχή χρήσης, μετά τη λήψη αναλγητικών φαρμάκων ή οιοπνεύματος).
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε βρέφη (0-3 ετών), διότι αυτά δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων, εφόσον ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής θερμοφόρας και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την ηλεκτρική θερμοφόρα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά, αν δεν επιβλέπει τη διαδικασία κάποιος ενήλικας.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα δεν προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Μην εισάγετε βελόνες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε διπλωμένη ή συμπιεσμένη.
- Μην τη χρησιμοποιείτε βρεγμένη.

- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με τον διακόπτη που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα επιτρέπεται να συνδέεται μόνο με την τάση δικτύου που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που εξέρχονται από αυτήν την ηλεκτρική θερμοφόρα μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να διαταράξουν τη λειτουργία του βηματοδότη σας. Ωστόσο βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τις οριακές τιμές: ένταση ηλεκτρικού πεδίου: μέγ. 5000 V/m, ένταση μαγνητικού πεδίου: μέγ. 80 A/m, μαγνητική επαγωγή: μέγ. 0,1 Milli-Tesla. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του βηματοδότη σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική θερμοφόρα.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή λυγίζετε απότομα τα καλώδια.
- Το καλώδιο και ο διακόπτης της ηλεκτρικής θερμοφόρας μπορούν, σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης, να καταστούν επικίνδυνα και να προκαλέσουν μάγκωμα, πνιγμό, σκόνταμα ή παραπάτημα. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα περισσευούμενα καλώδια και καλώδια γενικότερα, τοποθετούνται σωστά.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα πρέπει να ελέγχεται συχνά για να διαπιστωθεί μήπως παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή η ηλεκτρική θερμοφόρα χρησιμοποιήθηκε κατά μη ενδεδειγμένο τρόπο ή δεν θερμαίνεται πλέον, θα πρέπει πρώτα πριν από την επόμενη ενεργοποίηση να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι την ηλεκτρική θερμοφόρα (συμπεριλ. των παρελκομένων), διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της ηλεκτρικής θερμοφόρας πάθει κάποια ζημιά, πρέπει να απορρίπτεται. Αν το καλώδιο δεν αποσυνδέεται πρέπει να απορρίπτεται όλη η ηλεκτρική θερμοφόρα.
- Μην εκθέτεις τους διακόπτες και τα καλώδια στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Όταν αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται επάνω της
 - αιχμηρά αντικείμενα,
 - άλλη πηγή θερμότητας, όπως θερμοφόρα ζεστού νερού, ηλεκτρική θερμοφόρα ή παρόμοια.

- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του διακόπτη θερμαίνονται κατά τη χρήση της ηλεκτρικής θερμοφόρας. Γι' αυτόν τον λόγο ο διακόπτης δεν πρέπει να καλύπτεται ή να βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρική θερμοφόρα όταν αυτή λειτουργεί.
- Προσέξτε απαραίτητως τις υποδείξεις στα ακόλουθα κεφάλαια: Χειρισμός, καθαρισμός και φροντίδα, φύλαξη.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας.

3. Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα προορίζεται μόνο για τη θέρμανση του ανθρώπινου σώματος.

4. Χειρισμός

4.1 Ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα είναι εξοπλισμένη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αυτή η τεχνολογία αισθητήρων εμποδίζει την υπερθέρμανση της ηλεκτρικής θερμοφόρας σε ολόκληρη την επιφάνειά της μέσω αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση βλάβης. Αν το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έχει απενεργοποιήσει την ηλεκτρική θερμοφόρα, οι βαθμίδες θερμοκρασίας στην ενεργοποιημένη κατάσταση δεν φωτίζονται πλέον.
- Παρακαλούμε προσέξτε ότι η ηλεκτρική θερμοφόρα ύστερα από περίπτωση βλάβης για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει και πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση σέρβις που αναφέρεται.
- Ποτέ μην συνδέετε μία ηλεκτρική θερμοφόρα με βλάβη σε ένα άλλο διακόπτη ίδιου τύπου. Αυτό θα προκαλούσε επίσης μία οριστική απενεργοποίηση του διακόπτη μέσω του συστήματος ασφαλείας.


4.2 Θέση σε λειτουργία



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε ώστε η ηλεκτρική θερμοφόρα να είναι πάντα απλωμένη επίπεδα και να μην συμπιέζεται ή σχηματίζει πτυχές κατά τη χρήση.

- Συνδέστε πρώτα τον διακόπτη με το θερμαντικό σώμα συναρμολογώντας τον κουμπωτό σύνδεσμο.
- Μετά βάλτε το βύσμα στην πρίζα.

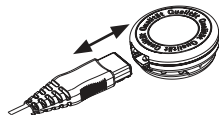

4.3 Ενεργοποίηση

Ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη ON/OFF και βαθμίδων θερμοκρασίας στη βαθμίδα 1, 2 ή 3 για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική θερμοφόρα.

Στην ενεργοποιημένη κατάσταση, οι βαθμίδες θερμοκρασίας φωτίζονται.

4.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Βαθμίδα 0: OFF

Βαθμίδα 1: Ελάχιστη θερμότητα

Βαθμίδα 2: Μεσαία θερμότητα

Βαθμίδα 3: Μέγιστη θερμότητα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να επιτύχετε ταχύτερη θέρμανση της ηλεκτρικής θερμοφόρας ρυθμίζετε πρώτα την υψηλότερη βαθμίδα θερμοκρασίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα έχει σύστημα ταχείας θέρμανσης που οδηγεί σε γρήγορη θέρμανση εντός των πρώτων 10 λεπτών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική θερμοφόρα για αρκετές ώρες, συνιστούμε να ρυθμίζετε τη χαμηλότερη βαθμίδα θερμοκρασίας στο διακόπτη για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του σώματος και ενδεχομένως εγκαύματος στο δέρμα.

4.5 Μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης

Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα είναι εξοπλισμένη με αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτή διακόπτει την παροχή θέρμανσης περίπου 90 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής θερμοφόρας. Η ένδειξη της βαθμίδας θερμοκρασίας τότε αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να μπορέσετε να θέσετε πάλι σε λειτουργία την ηλεκτρική θερμοφόρα, πρέπει πρώτα να θέσετε τον συρόμενο διακόπτη του ON/OFF και των βαθμίδων θερμοκρασίας στη θέση „0“ (OFF). Ύστερα από 5 περίπου δευτερόλεπτα είναι δυνατή νέα ενεργοποίηση.



4.6 Απενεργοποίηση

Ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη ON/OFF και βαθμίδων θερμοκρασίας στη θέση „0“ (OFF) για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική θερμοφόρα. Στη συνέχεια οι βαθμίδες θερμοκρασίας δεν θα ανάβουν πλέον.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν η ηλεκτρική θερμοφόρα δεν χρησιμοποιείται, ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη ON/OFF και βαθμίδων θερμοκρασίας στη θέση „0“ (OFF) και τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τον κουμπωτό σύνδεσμο και με αυτό τον τρόπο τον διακόπτη από την ηλεκτρική θερμοφόρα.

5. Καθαρισμός και περιποίηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τον κουμπωτό σύνδεσμο και με αυτό τον τρόπο τον διακόπτη από την ηλεκτρική θερμοφόρα. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να υποστεί ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο διακόπτης δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Για τον καθαρισμό του διακόπτη χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή μέσα που ξύνουν την επιφάνεια.
- Οι μικροί λεκέδες πάνω στην ηλεκτρική θερμοφόρα μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανί ή ενδεχομένως με λίγο υγρό απορρυπαντικό ήπιας μορφής.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε ότι η ηλεκτρική θερμοφόρα δεν επιτρέπεται να καθαριστεί χημικά, να σφιχτεί, να στεγνώσει σε στεγνωτήριο, να σιδερωθεί σε ατμοπρέσα ή με το σίδερο. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να υποστεί ζημιές.

- Αυτή η ηλεκτρική θερμοφόρα πλένεται στο πλυντήριο.
- Ρυθμίστε το πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα, στους 30 °C (πρόγραμμα για μάλλινα). Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό με δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Λάβετε υπόψη ότι η ηλεκτρική θερμοφόρα καταπονείται από το πολύ συχνό πλύσιμο. Γι' αυτό η ηλεκτρική θερμοφόρα πρέπει να πλυθεί στο πλυντήριο το πολύ 10 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.

- Αμέσως μετά το πλύσιμο τραβήξτε την ηλεκτρική θερμοφόρα όσο είναι ακόμα υγρή για να φθάσει στις αρχικές της διαστάσεις και σχήμα και αφήστε τη να στεγνώσει απλωμένη επίπεδα σε απλώςτρα ρούχων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε μανταλάκια ή παρόμοια αντικείμενα για να στερεώσετε την ηλεκτρική θερμοφόρα στην απλώστρα ρούχων. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να υποστεί ζημιές.
- Συνδέετε το διακόπτη πάλι με τη θερμοφόρα, μόνο αφού πρώτα η χωνευτή σύνδεση και η θερμοφόρα έχουν στεγνώσει πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να υποστεί ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική θερμοφόρα για να στεγνώσει! Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

6. Αποθήκευση

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική θερμοφόρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την αποθηκεύσετε στην αρχική της συσκευασία. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τον κουμπωτό σύνδεσμο και με αυτόν τον τρόπο τον διακόπτετε από την ηλεκτρική θερμοφόρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφήνετε την ηλεκτρική θερμοφόρα πρώτα να κρυώσει. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική θερμοφόρα μπορεί να υποστεί ζημιές.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην ηλεκτρική θερμοφόρα κατά την αποθήκευση, για να αποφύγετε το απότομο τσάκισμα.

7. Απόρριψη

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.



8. Τι κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Οι βαθμίδες θερμοκρασίας δεν φωτίζονται ενώ - ο διακόπτης είναι πλήρως συνδεδεμένος με την ηλεκτρική θερμοφόρα - το βύσμα είναι συνδεδεμένο με πρίζα που λειτουργεί - ο συρόμενος διακόπτης βρίσκεται στη βαθμίδα 1, 2 ή 3	Το σύστημα ασφαλείας έχει απενεργοποιηθεί μη αναστρέψιμα την ηλεκτρική θερμοφόρα.	Στείλτε την ηλεκτρική θερμοφόρα και τον διακόπτη για σέρβις.

9. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βλέπε ετικέτα τύπου στην ηλεκτρική θερμοφόρα.

10. Εγγύηση / σερβις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

